

## ANWENDUNGSBEREICH

### Umgang mit einer Partikelfiltrierenden Schutzmaske (FFP2 (filtering face piece) -Maske)

## WICHTIGE INFORMATIONEN



Die Viruserkrankung COVID-19 wird durch eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS CoV-2 ausgelöst. Diese Infektion kann auch asymptomatisch, ohne das Vorhandensein von Krankheitssymptomen verlaufen.

Das Virus wird zum einen beim Sprechen, Husten und Niesen über die Atemluft (Tröpfcheninfektion) oder über kontaminierte Hände auf die Schleimhäute von Mund, Nase und Augen (Schmierinfektion) übertragen.

Das Tragen einer FFP2-Schutzmaske mit einer Partikel-/Aerosolfilterung von mind. 94% (nach Prüfstandard EN 149:2001+A1:2009) ist eine Maßnahme, um die Verbreitung des Virus SARS CoV-2 weiter einzudämmen.

**Das Tragen einer FFP2-Maske bietet Eigenschutz als auch Fremdschutz!**

**Es wird den Beschäftigten arbeitstäglich eine FFP2-Maske zur Verfügung gestellt.**

## GEFAHREN FÜR DEN MENSCHEN



Der größte Teil der Erkrankungen verläuft mild. Es kann aber auch zu schweren Krankheitsverläufen kommen, insbesondere bei Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Dies betrifft vor allem ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen.

**Viren, Bakterien und Pilze/Pilzsporen können sich an der Außenseite der Maske ansammeln.**

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Die Pflicht des Tragens der partikelfiltrierenden FFP2-Maske gilt in allen Einrichtungen des Studierendenwerks Ulm:

- wenn der Mindestabstand von 1,5 – 2,00 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann
- die Mindestfläche von 10 m<sup>2</sup> pro Person in Räumen nicht eingehalten werden kann
- im öffentlichen Bereich mit Gäste-/Kundenkontakt
- im internen Arbeitsbereich mit Kontakt zu Kollegen, Lieferanten, Dritte
- auf allen Verkehrswegen der Einrichtungen des Studierendenwerks Ulm



### Anlegen

- Lange Haare zurückbinden; Bart im Idealfall soweit rasieren sodass er unter die Maske passt.
- Hände vor dem Anlegen der FFP2-Maske gründlich waschen (20 bis 30 Sekunden mit Seife).
- Innenseite der Maske nicht berühren!
- Maske über Kinn, Mund und Nase legen, Bänder hinter die Ohren klemmen. Den Nasenbügel fest an die Nase andrücken. Die FFP2-Maske muss dicht am Gesicht anliegen, d.h. es dürfen keine Luftströme ungefiltert austreten.
- Alternativ kann die Maske durch das Befestigen der Bänder an dem beiliegenden Clip am Hinterkopf getragen werden.



### Tragen

- Der Gebrauch der FFP2-Maske ist auf die Dauer einer Arbeitsschicht begrenzt!
- FFP2-Maske während des Tragens nicht berühren.
- FFP2-Maske nicht über dem Gesicht verschieben (z.B. zum Rauchen) oder falten.
- Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen und die Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und Niesetikette muss zusätzlich eingehalten werden.
- Die FFP2-Maske muss spätestens, wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet oder die Schicht beendet ist, gewechselt werden.

### **Abnehmen**

- Außenseite und Innenseite nicht anfassen (ggf. haben sich dort Erreger angesammelt).
- Nur an Ohrenbänder anfassen.
- Nach der Verwendung die FFP2-Maske zusammenfalten und ggf. in Kunststoffüte bis zur Entlüftung/Reinigung aufbewahren.
- Hände gründlich waschen (20 bis 30 Sekunden mit Seife).

## **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN**



- Bei starker Durchfeuchtung FFP2-Maske ersetzen.
- Eine defekte FFP2-Maske ist schnellstmöglich auszutauschen.

## **LAGERUNG UND ENTSORGUNG**



### **Lagerung**

- Nur saubere, entlüftete/entkeimte FFP2-Masken verwenden.
- Zwischen dem Tragen die FFP2-Maske, die Außenseite auf einer sauberen und trockene Unterlage lagern, damit die entstandene Feuchtigkeit in der Umgebungsluft verdunsten kann. Die getrocknete Maske kann während der Arbeitsschicht wieder benutzt werden.

### **Entsorgung**

- Die FFP2-Masken sind nach Verwendung über den Hausmüll zu entsorgen.

## **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG**

Ein Nichtbefolgen der Maßnahmen erhöht das Infektionsrisiko.

Betriebsanweisungen sind verbindlich und stellen eine schriftliche Arbeitsschutzanweisung an die Beschäftigten dar.